


FICHE TECHNIQUE

SIDESTREAM® Mini- nébuliseur haute performance

SANS LATEX

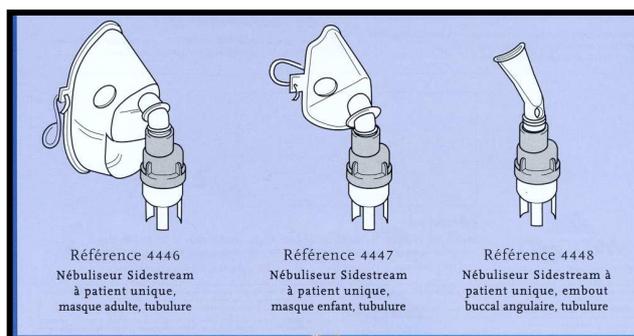

Références

- 4445SU :** Nébuliseur Sidestream (cuve seule)
- 4446SU :** Nébuliseur Sidestream avec **masque adulte et tubulure** (cf. illustration)
- 4447SU :** Nébuliseur Sidestream avec **masque enfant et tubulure** (cf. illustration)
- 4448SU :** Nébuliseur Sidestream avec **embout buccal angulaire et tubulure** (cf. illustration)
- 4452SU :** Nébuliseur Sidestream avec **embout buccal angulaire et tubulure** (par carton de 75)

Descriptif

Sidestream® est un mini nébuliseur à patient unique destiné à l'administration de solutions médicamenteuses par voies aériennes sous forme d'aérosol.

Disponible seul ou dans plusieurs configurations : avec masque adulte ou enfant, avec embout buccal, avec ou sans tubulure.

La conception unique et innovante de la cuve et une double cheminée intérieure qui génère un effet « turbo » font de Sidestream un nébuliseur **haute performance** avec une **nébulisation express** (2,5 ml en moins de 7 min.), un dépôt élevé de médicaments (80% de particules < 5 microns), et un faible volume résiduel (0,5 ml).

Caractéristiques

Cuve :	2 à 12ml	Débit :	6 L/mn
Débit total venturi ouvert :	16 L/mn	% de concentration en O² :	50
Sortie :	0.37 g/mn	% de particules < 5 µm :	80
Débit respirable :	0.3 g/mn	Temps d'administration pour 2,5 mL :	6,7 mn
MMAD:	3 µm	Volume minimal nébulisable :	0.75ml

Volume maximum nébulisable : 9ml

Granulométries en fonction des médicaments nébulisés et du débit:

Médicaments	4 l/min	6 l/min	8 l/mn
LOMUDAL	5.08	3.95	3.40
PULMICORT	5.58	4.18	3.48
AROMASOL	4.07	3.04	2.44
ATROVENT	5.31	3.67	3.11
GOMENOL	5.49	4.06	3.35
MUCOMYST	3.55	2.99	2.50
GENTALLINE	4.93	3.88	3.14
COLIMYCINE	4.72	3.75	3.07
VENTOLINE	4.47	3.39	2.92
XYLOCAINE	4.52	3.62	2.95
TOBRAMYCINE SULFATE (TOBI®)	4.62	3.56	2.97

Taille des particules MMAD (μm) produit à 4, 6 et 8 litres par minute de débit. (MALVERN Mastersizer:)

Composition des matériaux

4445SU / 4448SU : Polypropylène - **4446SU / 4447SU :** Polypropylène et PVC

Stérilisation et stockage

Produit non stérile, à patient unique (voir instructions pour le nettoyage).

A conserver dans un lieu sec, propre et convenablement aéré, à l'abri de la poussière et de toutes sources directes ou indirectes de lumière.

Conditionnement

UCD (Unité de Commande) : **50** (sauf pour réf 4452SU : 75)

CDT (Multiple de l'UCD) : Nous consulter

QML (Quantité Minimale de Livraison) : **50** (sauf pour réf 4452SU : 75)

Précautions d'emploi

Se conformer à la notice d'utilisation

Distributeur: Teleflex Medical SAS 31460 Le Faget - France

Fabricant : Respironics UK

Classe IIa – SGS CE0120

MARQUAGE CE selon Annexe II de la Directive 93/42/CEE